

凝固検査 PT・APTTのご案内

当日に結果をご報告いたします

検査結果について

- 当センターではワーファリンなどの効果を迅速にご報告するために、検査終了後直ちにFAXにて結果をお送りしております。
- 午後の集配でお預かりした検体についても、当日中に結果をご報告いたします。
また、PTについてはPT-INR（国際標準比）も併せてご報告いたします。

採血時の注意

- 凝固検査用の採血管には、3.2%クエン酸ナトリウムが0.2mL添加されています。
これに血液を1.8mL（白線まで）採血し、静かに約10回転倒混和してください。
- 採血量が少ない場合、PT・APTTは延長し、採血量が過多の場合、PT・APTTは短縮します。
- 乳び検体は測定不可になる可能性があります。
- 採血後4時間を超えると凝固因子活性が低下し、検査結果が延長するため、採血後早期の遠心分離（1～4時間以内）が必要です。

当センターでは昼と夕方の1日2回集配を行っており、検体到着後すぐに遠心分離をしております。



← 白線まで採血をしてください